

Testprocedures SARS-CoV-2 Antigeentestkit (Colloïdaal Goud Chromatografische Immuniteitstest)

Productcode:MF-68

1

Nasaal wattenstaafje (2,5 cm diep)

Illustratie van monstername


1.1 Was of ontsmet uw handen voor u de kit gebruikt. Zorg ervoor dat ze droog zijn voor u start met testen.




1.2 Bevestig de testcomponenten




1.3 Scheur de aluminiumfoliezak en neem de testkaart eruit. Leg de kaart op een egaal oppervlak zoals een tafel. Vermijd aanraking van de resultaat- en monstergatgedeeltes.

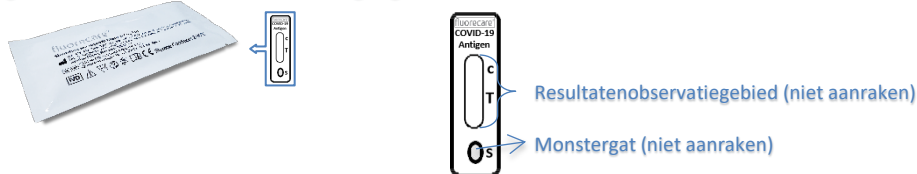


1.4 Illustratie van monstername (nasaal wattenstaafje)

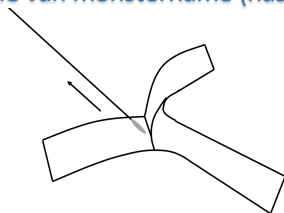

1 Verwijder het steriele nasaal wattenstaafje voorzichtig uit de verpakking. (Vermijd aanraking van het uiteinde van het wattenstaafje)

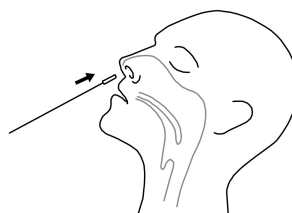

2 Steek het wattenstaafje tot een diepte van 2,5 cm vanaf de rand in het linker neusgat.

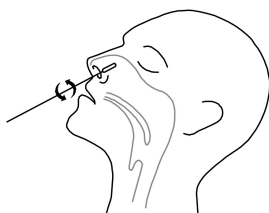


3 Draai het wattenstaafje 5 keer tegen de neusgatwand (slijmvlies) om een adequate monstername te garanderen.



4 Herhaal het proces in het rechter neusgat met hetzelfde wattenstaafje, verzamel monsters in beide neuskanalen om een adequate monstername te garanderen.


Monster testen

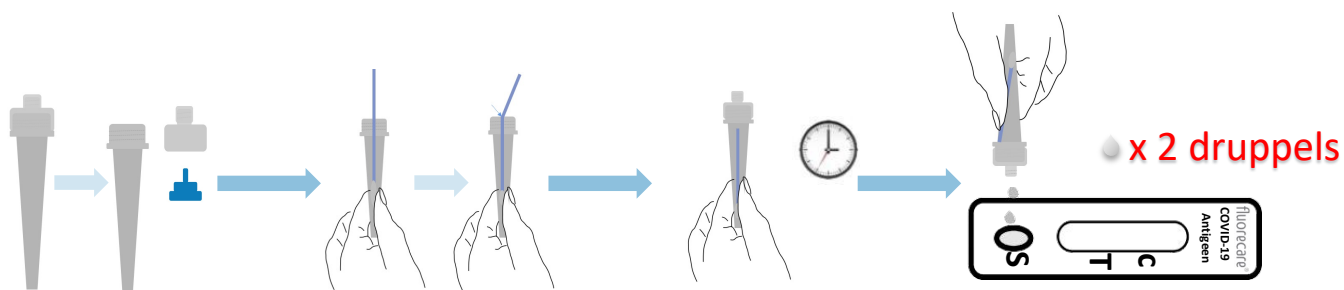


- 1 Open de druppeldop van de behandelingsbuis en verwijder de binnenste stop.
- 2 Steek het wattenstaafjemonster in de buis, breek het wattenstaafje vervolgens af en laat de onderste helft in de behandelingsbuis zitten.
- 3 Plaats het druppelaardeksel, knijp het wattenstaafje in de buis 10 keer samen. Wacht 5 minuten op reactie van het monster.
- 4 Open het deksel van de druppelaar en doe verticaal 2 druppels (ongeveer 60 µl) van de monstervloeistof in het monstergat. Wacht 15 minuten op een reactie bij kamertemperatuur.

2


Lees het resultaat af

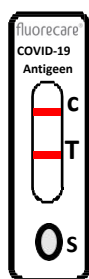


Positief*

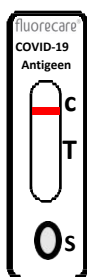

Negatief**

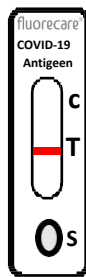


Ongeldig

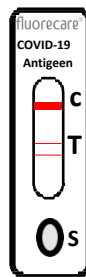

*Volg de lokale overheidsprotocollen voor uw land op als uw testresultaat positief is. Zorg ervoor dat u zichzelf isoleert om de verspreiding van de infectie naar anderen te minimaliseren

**Negatieve testresultaten sluiten de aanwezigheid van coronavirussen in het monster nooit uit aangezien ze aanwezig kunnen zijn in een concentratie onder de minimale detectielimiet. Wanneer het antigeengehalte in het monster lager is dan de minimale detectielimiet, kan de test een vals negatief resultaat opleveren. Verdere tests, waaronder nucleïnezuurtests zoals PCR-tests, worden aanbevolen bij de beoordeling van verdachte negatieve resultaten.

OPMERKING: Na de observatie wordt de kit inclusief de monsterbehandelingsbuis weer in de zak gestoken en in de vuilnisbak geworpen.

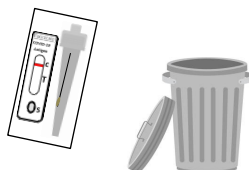

Scan de QR-code om de video te bekijken



<https://youtu.be/K0eXJCcNuKM>