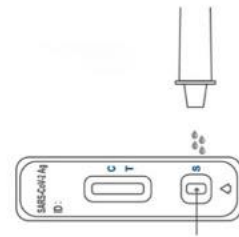
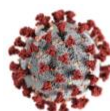


FlowflexTM
SARS-CoV-2
Antigen Rapid Test (Self-Testing)

ZELFTEST**ACON**
BIOTECH

fagg

**CNK 4401253**

?

VERPAKKING

Per 25
Individueel verpakt



?

LEVERING

Verzending op de dag van bestelling
indien besteld vóór 15h

Verzekerde bpost levering



VOORDELEN



Snel



Accuraat



Betrouwbaar



Eenvoudig



Certificaat

GOEKEURINGEN



➤ [CE0123 - Tüv Sud - Acon Biotech
- Flowflex zelftest](#)

➤ [FAGG-lijst met CExxx
goedgekeurde zelftesten](#)

➤ [website FAGG](#)

PERFORMANTIE

Sensitiviteit



97,1 %

effectiviteit



99,5 %

HOE

?

test uitvoeren

INSTRUCTIEVIDEO:




1

Test voorbereiden

1) Open de testkit



2) Controleer de inhoud

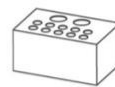

1 kitbox



1 neuswisser (wattenstaafje)



1 testcassette



1 voorgevuld
extractie bufferbuisje



1 bijsluiter




1 afvalzakje

3) Was of ontsmet je handen



4) Lees de instructies

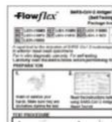

5) Controleer de vervaldag



6) Open het foliezakje en controleer het resultaatvenster en monsteropening op de testcassette




resultaatvenster

monsteropening

2

Staalafname

Staalafname door
een ouder -of-
wettelijke voogd

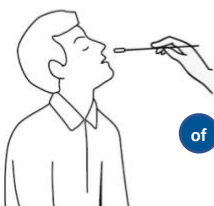


of


Zelf
afname



Steek de hele absorberende punt van de swab in een neusgat. Druk met een soepele rotatie de swab op minder dan 2,5cm van de rand van het neusgat.

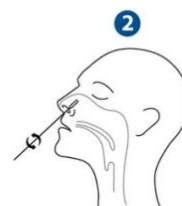

Draai het wattenstaafje 5x en strijk tegen de binnenkant van het neusgat.

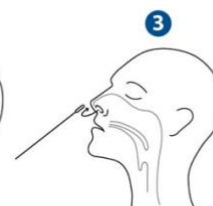




Verwijder het wattenstaafje en plaats het in het andere neusgat. Herhaal stap 2.



Verwijder het wattenstaafje uit het neusgat

3

Staalvoorbereiding

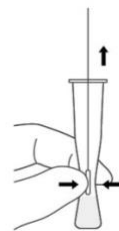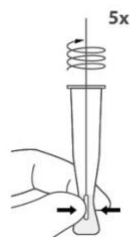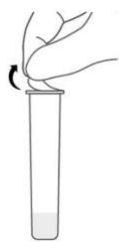

Verwijder de aluminiumfolie van de bovenkant van het gevulde extractie bufferbuisje.

Breng het wattenstaafje in het buisje en draai rond gedurende 30 seconden.

Draai het wattenstaafje 5x rond terwijl u in de zijkant van het buisje knijpt.

Verwijder het wattenstaafje terwijl u in de buis knijpt.

4

Testen van het staal



4 druppels



monsteropening



15-30 min.



Negatief



Positief



Ongeldig

Bevestig de druppelaar op het extractiebufferbuisje. Meng grondig door naar links en rechts te schudden of door tegen de bodem van het buisje te tikken. NIET OP EN NEER SCHUDDEN, want dat veroorzaakt luchtbelletjes.

Draai het buisje ondersteboven. Knijp zachtjes in het buisje en doseer 4 druppels van de oplossing in de monsteropening aangeduid met een S.

Lees het resultaat af als de timer 15-30 minuten heeft bereikt.

Lees het resultaat niet af na 30 minuten.

DOCUMENTATIE



BIJSLUITER + TESTPROCEDURE

- [Bijsluiter + testprocedure - Flowflex \(Acon biotech\)](#)
- [Dépliant + mode d'emploi - Flowflex \(Acon Biotech\)](#)

Klik op de
url linken

VIDEO TESTPROCEDURE

- [Nederlands](#)
- [Français](#)
- [English](#)

CONTACT

?



pH-20

pH-20 bv

Coupure Links 279
9000 Gent
België

BE0757 916 329

KLIK

pH-20
website

VERKOOP

Johan Van den Heede



+32 496 58 21 70



Johan.vandenheede@ph-20.com

Joke Dewaele



+32 478 38 12 85



Joke.dewaele@pH-20.com

LOGISTIEK

Sibyl Sintobin



+32 496 53 08 96



Sibyl.sintobin@pH-20.com