



pH-20

[www.pH-20.com](http://www.pH-20.com)



# COVID-19 Antigen Detection Kit




Test antigénique

CNK 4383980

**AUTOTEST**



**CE 1434**

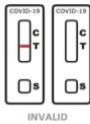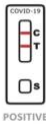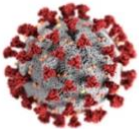


POSITIVE

NEGATIVE

INVALID

# EMBALLAGE

?

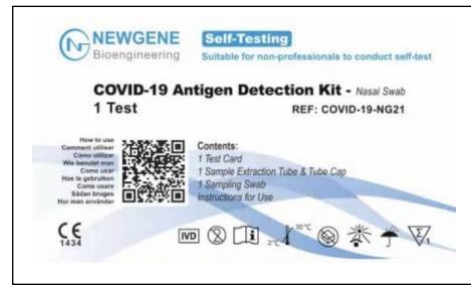

25  
par boîte



Emballage  
individuel



## APPROBATIONS

**CE**  
1434

**afmps**  
agence fédérale des médicaments et des produits de santé  
[Autotests CE approuvé par l' AFMPS](#)

## LIVRAISON

Expédition **le jour de la commande**  
si commandée **avant 15h**

Livraison avec **bpost assurée**

## PERFORMANCE

**Sensibilité**

97,1 %

**specificité**


99,2 %

# COMMENT


?

## appliquer le test

1

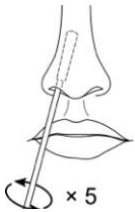


- Insérez délicatement l'embout de l'écouvillon à 2-3 cm dans la cavité nasale
- Faites tourner délicatement l'écouvillon 5x pendant 20 secondes

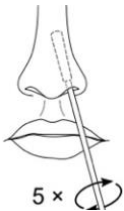


- Insérez délicatement le même embout d'écouvillon dans l'autre cavité nasale
- Faites tourner délicatement l'écouvillon 5 fois pendant 20 secondes

2

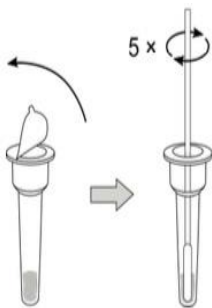

- Retirez l'opercule en aluminium du tube de prélèvement de l'échantillon
- Placez l'écouvillon dans le tube de prélèvement de l'échantillon. Utilisez l'écouvillon pour remuer la solution au moins 5 fois

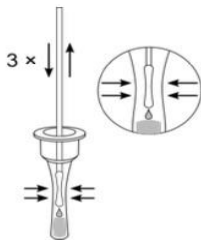


- Pressez le tube avec les doigts
- Déplacez l'écouvillon de haut en bas au moins 3x pour expulser toute solution du prélèvement de l'écouvillon.
- Retirez l'écouvillon




- Insérez fermement le bouchon du tube sur le tube de prélèvement en question
- Pressez doucement le tube 3 fois pour mélanger la solution de prélèvement
- Laissez le tube immobile pendant 1 minute


3

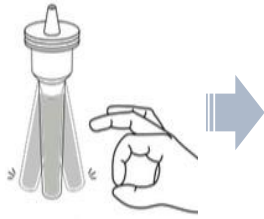

- Claquer avec vos doigts sur le tube d'extraction d'échantillon pour mélanger la solution d'échantillon de manière optimale

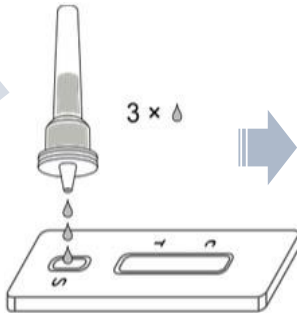


- Ouvrez la pochette pour en sortir une carte de test.
- Tenez le tube à l'envers
- Ajoutez 3 gouttes de solution de prélèvement dans le compartiment de la carte de test.

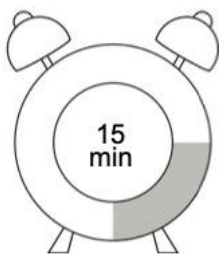


- Lisez le résultat **après 15 minutes**
- Le résultat est considéré comme inexact et non valide après 30 minutes
- Ne pas remettre de solution échantillon sur une carte de test usagée


4

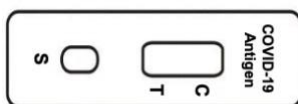


### Interpretation des résultats

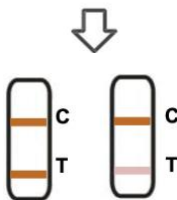

- **Positif (+)** : Des bandes rouges apparaissent sur les lignes T et C en 15 à 30 minutes

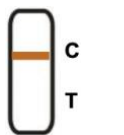

- **Négatif (-)** : Une bande rouge apparaît à la ligne C tandis qu'aucune bande rouge n'apparaît à la ligne T dans les 15 à 30 minutes après le remplissage de l'échantillon

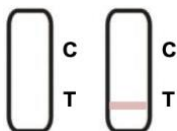

- **Invalide** : Si aucune bande rouge n'apparaît sur la ligne C, cela indique que le résultat du test n'est pas valide. Refaire le test avec une autre carte de test.

# DOCUMENTATION



## DÉPLIANT (Mode d'emploi)

- [NewGene CE1434 - Autotest COVID 19](#)

## VIDÉO D'APPLICATION

- [Français](#)
- [Néerlandais](#)
- [Allemand](#)

Cliquez  
sur le  
lien URL

# À CONTACTER



pH-20

**pH-20** bv  
Coupure Links 279  
9000 Gent  
België  
FAGG: BE/CA01/1-72654  
[www.pH-20.com](http://www.pH-20.com)

## VENTE

### Johan Van den Heede

📞 + 32 496 58 21 70  
✉ [johan.vandenheede@ph-20.com](mailto:johan.vandenheede@ph-20.com)

### Joke Dewaele

📞 + 32 478 38 12 85  
✉ [joke.dewaele@ph-20.com](mailto:joke.dewaele@ph-20.com)

## LOGISTIQUE

### Sibyl Sintobin

📞 + 32 496 53 08 96  
✉ [sibyl.sintobin@ph-20.com](mailto:sibyl.sintobin@ph-20.com)